

OVA

Instructions for Use
Please read carefully


TensCare™

Introduction

La Ceinture Ova Therma offre une thermothérapie apaisante et des modes de massage doux pour vous aider à faire face aux symptômes des douleurs menstruelles.

Elle se porte autour de la taille et offre trois niveaux de température pour un soulagement maximal.

Comment l'utiliser

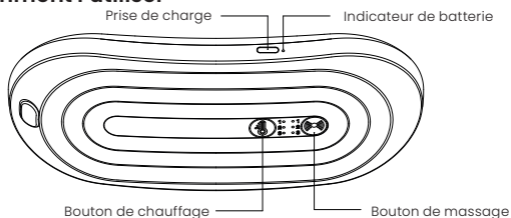

Mettez la ceinture autour de votre taille. Elle doit être portée par-dessus les vêtements.

La ceinture peut être portée sur le bas de l'abdomen ou le bas du dos. Choisissez la position qui vous soulage le plus.

1. La ceinture peut être mise en marche en activant les modes de chauffage ou de massage. Maintenez le bouton de chaleur enfoncé pour démarrer la thérapie par la chaleur, et le bouton de massage pour démarrer le massage.
2. Sélectionnez la température et les modes de massage souhaités en appuyant sur les boutons de chauffage et de massage.

	Défaut	1ère pression	2ème pression
Chaleur	50°C	55°C	60°C
Massage	Mode 1	Mode 2	Mode 3

L'appareil peut être porté aussi longtemps que nécessaire. Il convient toutefois de repositionner régulièrement le coussinet.

3. Désactivez la chaleur et/ou le massage en maintenant les boutons de chaleur et/ou de massage enfoncés. La ceinture est alors désactivée.

Lorsque la batterie est faible, le voyant situé à proximité de la prise de charge clignote en rouge. La Ceinture Ova Therma peut

être rechargée en la connectant à une source d'alimentation via le câble de charge USB-C fourni. Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant la première utilisation.

Avvertissement : Ne pas utiliser pendant la charge..

Directives de Sécurité

- Ne pas utiliser si vous souffrez de goutte, de cancer du col de l'utérus ou de maladie cardiaque.
- Ne pas utiliser si vous êtes enceinte.
- En cas d'utilisation prolongée, repositionner régulièrement le coussinet. En cas de réaction anormale de la peau, arrêter immédiatement l'utilisation.
- Ne pas utiliser si vous avez une peau sensible ou si vous n'êtes pas sensible à la chaleur.
- Ne pas utiliser sur une peau abîmée ou une plaie non cicatrisée.
- Ne pas utiliser pendant le sommeil.
- Ne pas utiliser dans des environnements très chauds, inflammables, à rayonnement électromagnétique ou humides.

Garantie

Le produit bénéficie d'une garantie contre les défauts de fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie porte sur l'appareil et n'inclut pas le câble de chargement.

Elle est annulée si le produit est modifié ou altéré, s'il a fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, s'il a été endommagé pendant le transport, s'il n'a pas été entretenu de manière responsable, s'il est tombé, s'il a été immergé dans l'eau, s'il a été endommagé en raison du non-respect du manuel d'utilisation ou si des réparations ont été effectuées sans l'autorisation de TensCare Ltd.

Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation et suivre toutes les instructions avant d'envoyer votre appareil en réparation. Si une réparation se révèle nécessaire avant la fin de la période de garantie, veuillez renvoyer l'appareil avec les informations suivantes :
Nom, adresse, téléphone, courriel, date d'achat, preuve d'achat
Returns should be sent to the following address:

TensCare Ltd, 9 Blenheim Road, Epsom, Surrey, KT19 9BE, U.K.

For more information, call +44 (0) 1372 723 434.